

1. DESCRIÇÃO

A família de Braço Articulado Injetados são produtos destinados para a utilização em ambientes hospitalares, para facilitar a organização do ambiente e permitir um melhor atendimento e segurança ao paciente.

É aplicado em centros cirúrgicos, UTI's, salas de recuperação e entre outros lugares que venha a ter a necessidade de um equipamento como tal.

2. COMPOSIÇÃO

O produto é composto de: Alumínio anodizado e Nylon.

Peso: Aprox. 600 g

3. APRESENTAÇÃO



4. MODELOS

MODELO	DESCRIÇÃO
VI-1000	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS COM BUCHA ADAPTADORA
VI-1100	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS ROSCA 9/46"
VI-1110	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS COM SUPORTE
VI-1170	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS HASTE 170
VI-1200	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS ROSCA M14X1
VI-1380	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES INJETADAS HASTE 380
VI-1300	BRAÇO TRÊS ARTICULAÇÕES INJETADAS ROSCA 9/16"
VE-1100	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES EXTRUDADAS ROSCA 9/16"
VE-1170	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES EXTRUDADAS HASTE 170
VE-1200	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES EXTRUDADAS ROSCA M14 X 1
VE-1300	BRAÇO TRÊS ARTICULAÇÕES EXTRUDADAS ROSCA 9/16"
VE-1380	BRAÇO DUAS ARTICULAÇÕES EXTRUDADAS HASTE 380



5. FINALIDADE

Os Braços Articulados têm finalidade como suporte para circuitos respiratórios. Além disso, são compatíveis com diversas marcas de equipamentos de ventilação mecânica.

6. INSTRUÇÕES DE USO

1. Segurar o braço com as duas mãos.
2. Aliviar o peso com uma das mãos.
3. Pressionar o botão trava e movimentar o braço para ajuste.

Nota: Verifique a imagem abaixo.

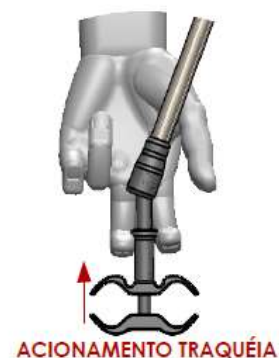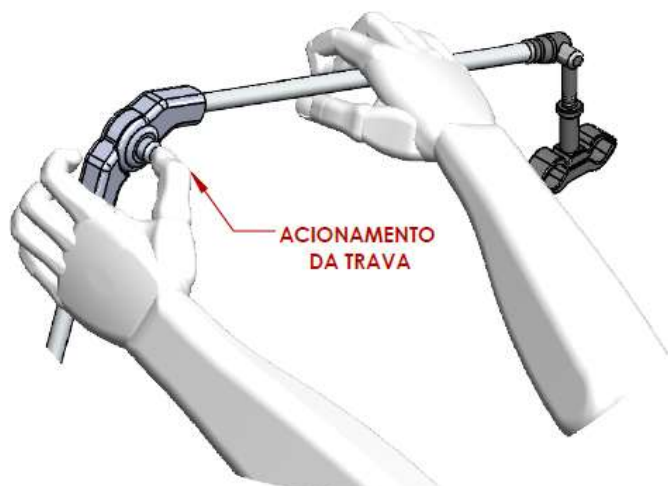

7. PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS

- Não locomover o equipamento pelo braço articulado.
- Não ultrapassar o peso especificado no manual
- Não manusear sem pressionar o botão de acionamento.
- Não utilizar como apoio para o usuário.
- Suporta até 4 kg

8. ARMAZENAMENTO

Estocar a temperatura ambiente em local seco e fresco.

FABRICANTE E DISTRIBUIDOR

VIVAZ MED FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA MEDICINA LTDA

R JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA, 102 - VILA EMIR - CEP: 04.461-060 – SÃO PAULO/SP.

CNPJ: 34.928.279/0001-90

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - FONE (11) 2387-0008

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JULIO CESAR ZAMBON - CREA 0681886376

REGISTRO ANVISA: 82433410004