

1. DESCRIÇÃO

A família de suportes **de parede para monitor multiparamétrico** consiste em uma estrutura metálica projetada de forma específica para proporcionar apoio e movimentação funcional na utilização de monitores multiparamétricos e garantir que não haja queda e nem coloque a vida do paciente em risco.

É aplicado em centros cirúrgicos, UTI's, salas de recuperação e entre outros lugares que venha a ter a necessidade de um equipamento como tal.

2. COMPOSIÇÃO

- Tubo de alumínio anodizado ou de aço com pintura eletrostática;
- Rotação 180° do monitor;
- Inclinação de 15° do monitor
- Opção de uma ou duas articulações;
- Fixação na parede na posição vertical, horizontal ou suporte VESA.

Peso: Aprox. 1,1 a 2,1 Kgs

3. APRESENTAÇÃO



4. MODELOS

MODELO	DESCRIÇÃO
SM-14100	SUORTE MONITOR 1 ARTICULAÇÃO ENGATE RÁPIDO FIXAÇÃO VESA
SM-14110	SUORTE MONITOR 1 ARTICULAÇÃO ENGATE RÁPIDO FIXAÇÃO COM TRILHO
SM-14120	SUORTE MONITOR 1 ARTICULAÇÃO BASE DESLIZANTE FIXAÇÃO VESA

SM-14130	SUPOORTE MONITOR 1 ARTICULAÇÃO BASE DESLIZANTE FIXAÇÃO COM TRILHO
SM-14200	SUPOORTE MONITOR 2 ARTICULAÇÕES ENGATE RÁPIDO FIXAÇÃO VESA
SM-14210	SUPOORTE MONITOR 2 ARTICULAÇÕES ENGATE RÁPIDO COM TRILHO
SM-14220	SUPOORTE MONITOR 2 ARTICULAÇÕES BASE DESLIZANTE FIXAÇÃO VESA
SM-14230	SUPOORTE MONITOR 2 ARTICULAÇÕES BASE DESLIZANTE FIXAÇÃO COM TRILHO
SM-14300	SUPOORTE MONITOR PLUS ENGATE RÁPIDO FIXAÇÃO VESA
SM-14320	SUPOORTE MONITOR PLUS BASE DESLIZANTE FIXAÇÃO VESA
SM-14330	SUPOORTE MONITOR PLUS BASE DESLIZANTE COM TRILHO
SM-14400	SUPOORTE MONITOR UNIVERSAL 1 ARTICULAÇÃO FIXAÇÃO VESA
SM-14410	SUPOORTE MONITOR UNIVERSAL 2 ARTICULAÇÕES FIXAÇÃO VESA



5. FINALIDADE



Os Suportes de Monitores têm finalidade como suporte para monitores multiparamétricos. Além disso, são compatíveis com diversas marcas de equipamentos.

6. INSTRUÇÕES DE USO

1. Fixação na parede de alvenaria com os parafusos especificados:
 - Parf. Auto Atarraxante cabeça Phillips 6,3 X 70 mm
 - Bucha plástica com aba modelo Universal UX-10 – FISCHER
2. Fixar o monitor através do adaptador na base engate rápido ou deslizante.
3. Ajustar o monitor conforme fig. abaixo, rotacionando e com a inclinação apropriada para o uso.

Nota: Verifique as imagens abaixo.

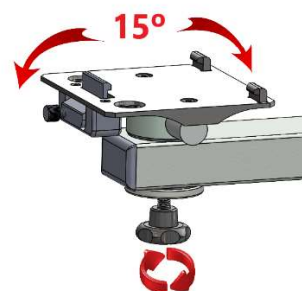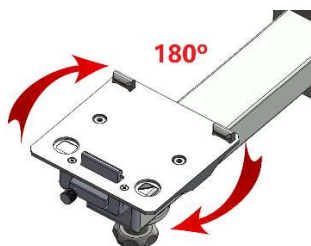

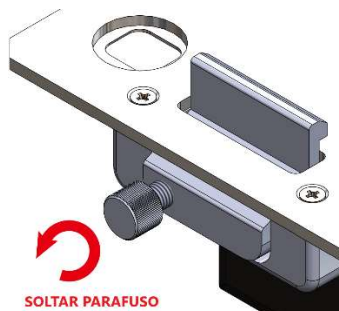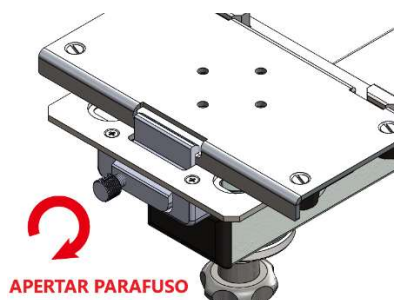

7. PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS

- Não fixar em divisórias ou dryall;
- Não ultrapassar o peso especificado no manual;
- Não utilizar como apoio para o usuário;
- Suporta até 20 Kg e suporte PLUS até 25 Kg

8. ARMAZENAMENTO

Estocar a temperatura ambiente em local seco e fresco.

FABRICANTE E DISTRIBUIDOR

VIVAZ MED FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA MEDICINA LTDA

R JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA, 102 - VILA EMIR - CEP: 04.461-060 – SÃO PAULO/SP.

CNPJ: 34.928.279/0001-90

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - FONE (11) 2387-0008

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JULIO CESAR ZAMBON - CREA 0681886376

REGISTRO ANVISA: 82433410003